

## LEPU SARS CoV-2 Antigen Schnelltest



LEPU SARS CoV-2 Antigen Schnelltest  
In nur 5 Schritten zum Testergebnis



<https://www.vathauermedtech.de/sars-cov-2-antigen-schnelltest>

# LEPU SARS CoV-2 Antigen Schnelltest

## Produktinformationen

Der SARS-CoV-2 Antigen Test bietet eine schnelle und zuverlässige Antwort sowohl für symptomatische als auch für asymptomatische Patienten im Hinblick auf eine SARS-CoV-2 Infektion. So kann zum Beispiel ein genaues Screening von Personen mit bekanntem Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten durchgeführt werden und der Infektionsstatus ermittelt werden. Das SARS-CoV-2 Antigen Test Kit enthält alle benötigten Materialien und kann von medizinischem Fachpersonal ortsunabhängig verwendet werden.

Am 26. Januar 2021 erklärte der Bericht des PEI über einen offiziellen Test, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Durchführung befugt war, dass das Lepu SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkit alle Mindestanforderungen für Antigentests erfüllt hat, die von PEI in Absprache mit dem Robert Koch-Institut (RKI) durchgeführt wurden.

## Inhalt

Im Antigen Schnelltest Kit sind folgende Produkte enthalten:

- Schnelltests (25 Stück / Packung)
- Steriler Abstrichtupfer
- Testkassette
- Gebrauchsanweisung / Beipackzettel

Lagerbedingung: 4 - 30 °C

Haltbarkeit: 12 Monate

## Ihr Ergebnis in nur 5 Schritten und in 15 Minuten

Schritt 1: Verwenden Sie den Tupfer, um Proben zu sammeln.

Schritt 2: Kleber abziehen.

Schritt 3: Führen Sie den Tupfer von Vertiefung B nach Vertiefung A ein.

Schritt 4: 6 Tropfen Sie die Pufferlösung in die Vertiefung A. Die Welle drehen, zwei Runden in jede Richtung.

Schritt 5: Falten Sie die linke Seite um und warten Sie 15 Minuten.

Anwendungsvideo unter <https://www.vathauermedtech.de/sars-cov-2-antigen-schnelltest>

## **Der Nutzen**

Der SARS-CoV-2 Antigen -Test wird von medizinischem Fachpersonal patientennah durchgeführt. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn zeitnah Entscheidungen getroffen werden müssen oder Laboruntersuchungen schwer zugänglich sind. Der Test hilft, infizierte Personen schnell zu erkennen, ermöglicht ein besseres Patientenmanagement sowie eine effektivere Nutzung der Ressourcen des Gesundheitswesens. Die Ergebnisse sollen die Frühdiagnose einer SARS-CoV-2-Infektion bei Patienten mit klinischen Symptomen von SARS-CoV-2 erleichtern und bei der Initialuntersuchung von Patienten helfen. Darüber hinaus dient er als wertvolle Ergänzung in der Diagnostik für das initiale Screening von Personen mit direktem Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten oder denjenigen, die einer Hochrisikoumgebung ausgesetzt waren. Dadurch kann eine Ausbreitung des Virus unterbunden und die Pandemie eingedämmt werden.



<https://www.vathauermedtech.de/sars-cov-2-antigen-schnelltest>

**Vathauer Medtech**

*Eine BU der MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG*

*Am Hessentuch 6-10*

*32758 Detmold*

*Tel: +49 (0)5231 – 63030*

*eMail: [info@vathauermedtech.de](mailto:info@vathauermedtech.de)*

*[www.vathauermedtech.de](http://www.vathauermedtech.de)*